



## 1- Procédure de recueil de salive à l'aide du tube Vircell Transport Medium®


- Le prélèvement doit être réalisé 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliment, de cigarette (ou e-cigarette), d'un brossage des dents ou d'un rinçage buccodentaire. Il doit se faire si possible sous la surveillance d'une infirmière (box de prélèvement derrière la vitre ou en face de la cabine en extérieur). Pour un recueil de salive optimal, le sujet devra ne pas déglutir, se passer la langue le long des joues ou se masser les joues afin de stimuler la production de salive ;

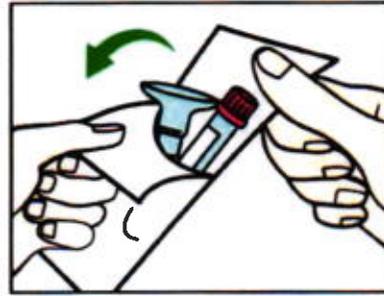


Ouvrir le dispositif de prélèvement

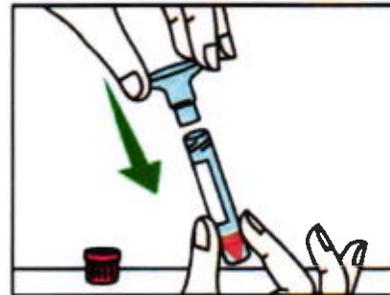

Monter l'entonnoir à usage unique sur le tube, noter le nom du sujet

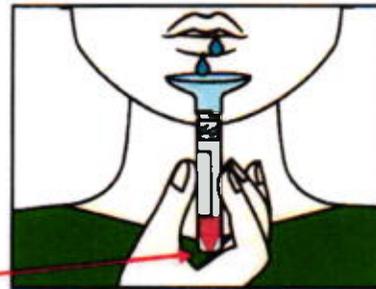

Le sujet crache, sans tousser, ni se racler la gorge (obtenir environ 1 ml : doit atteindre le bas de l'étiquette)

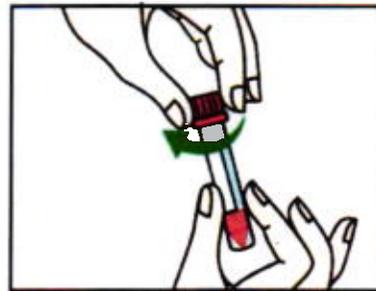

Éliminer l'entonnoir dans une poubelle ménagère ou un DASRI et revisser le bouchon.



Homogénéiser par retournement, puis identifier le tube : nom, prénom, date et heure de recueil, puis le mettre en sachet



La transmission du tube au laboratoire peut se faire 6 h à T° ambiante, au-delà mettre entre 2 et 8°C pendant 48h max